

## 咽 頭(のどの性感染症) 自己採取手順

※採取方法が悪いと正確な検査ができないため、必ずこの説明書をよくお読み下さい。


### のどのうがい液採取方法

飲料水でうがいをして、専用の容器にうがい液を採取して頂く簡単な方法です。  
この検査は、淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマを調べます。


採取方法はいたって簡単ですが、採取方法をよく読んで採取して下さい。



1. ペットボトルのキャップ1~2杯 (約10ml) の水道水で10秒間ほど、のどの奥をガラガラうがいして下さい。(ペットボトルのキャップが無い場合は、ほぼ同じくらいの水道水で結構です。)

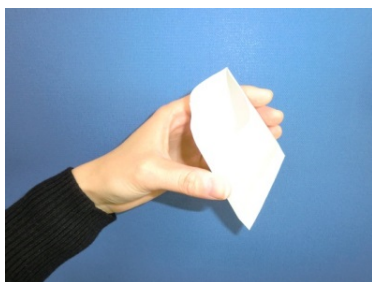

2. うがい液を折りたたみ紙コップに吐き出します。

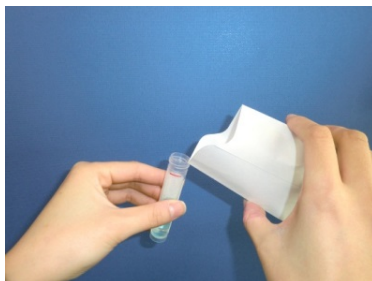

3. うがい液を水色の保存液入りチューブの赤い線まで入れて下さい。  
注) 水色の保存液は飲めません。



4. キャップをしっかり閉めて下さい。  
最初、逆方向に回して「カッチ」と音がしたら(うまく溝にはまった事を確認)、しっかりきつめに閉めて下さい。  
シールに氏名、生年月日、採取日を記入します。



5. 容器を保存袋(チャック袋)に入れ、余分な空気を出してしっかり閉めて下さい。  
性器の検査も同時にある時は2つの検体を一緒に入れて下さい