

## 返送について

採取した器具を検査依頼書・結果報告方法・アンケート(任意)とともに返信用封筒にてアイラボまでご返送ください。

返信用封筒をご利用いただくと、返送料が無料になります。

**ご記入箇所**

**結果報告の受け取り方**

オンラインでの確認  
ユーザー登録していただけます。検査完了のお知らせを受け取ったときに結果を確認できます。  
結果報告は複数ありますので、いつも確認が可能です。

郵便による結果について  
1. 郵便にて、AI-LABOのサイトにて「結果確認」を行ってください。  
2. 登録いただいた「検査番号」マークを押すと、検査結果が表示されます。AI-LABOのサイトにて「結果確認」を行ってください。

結果でのご確認  
検査完了報告メールにてさせていただいている、検査結果を確認、いたします。  
検査結果が届きましたら、必ず確認をお願いしております。検査結果が届いた場合は、必ず確認をお願いいたします。

**返送部分**

検査結果は、郵送の場合はお時間がかかりますのでインターネットでのご確認をお勧めします。

ご登録いただくといつでも結果が確認出来ますので、ぜひご登録ください。

## 男性HPV検査キットの使い方



### ※お使いになる前にご確認ください

- ・入浴直後の採取は控えて下さい。ただし、入浴後2時間以上経っていれば大丈夫です。
- ・採取直前のセックスは控えて下さい。
- ・手をよく洗って、清潔な状態で採取して下さい。




Be with you...

あなたと一緒に

## 各部分の名称

こちらの名称を使って説明しますので、まずご確認下さい。

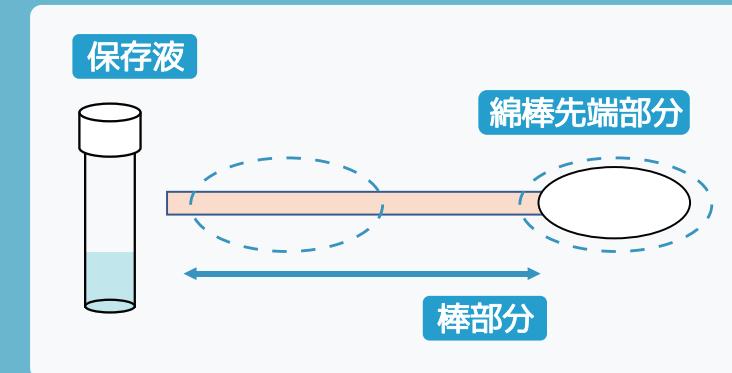

保存液の容器には「採取日」「お名前」「年齢」をご記入いただくシールが貼ってあります。

こちらにまずご記入をお願いいたします。

**ILABO**  
アイ・ラボ Cytostd 研究所

0426-52-0750  
(月～金・日 10:30～18:00 土・祝休)

# 男性HPV 自己採取手順

## 1. 採取前の準備

透明の保護袋から綿棒を取り出します。

滅菌済みの綿棒ですので、**綿棒先端部分には触れない様、棒部分を持って**取り出してください。

取り出したら、綿棒先端部分を**水道水**で軽く湿らせてください。




保護袋に同梱されている青い液体は保存液ですので**保存液を使用しない**様ご注意ください。

綿棒は予備を入れて2本入っていますが、使用するのは1本です。  
万が一失敗したと思った場合は、予備をお使いください。

## 2. 採取する

水で湿らせた綿棒の綿棒先端部分で、気になるところを擦っていきます。  
一度だけ擦るのではなく、少なくとも3,4回程度擦ってください。

気になる箇所が複数ある場合、全ての箇所をお使いの綿棒で各箇所数回ずつ擦っていただくと、より良く採取ができます。

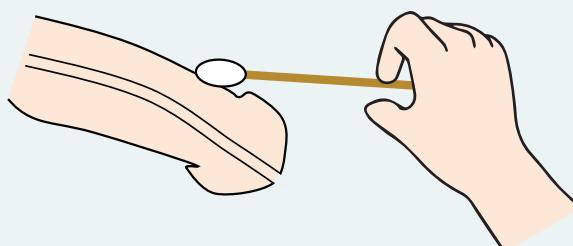


HPVのウイルスは、細胞の中に潜みます。

触れる程度に擦るのではなく、表面にある細胞を擦り取るイメージでしっかりと擦ってください。


ただしデリケートな部分ですので、強く擦りすぎると傷をつけてしまいます。

擦り傷になってしまふ位に強く擦る必要はありません。  
綿棒で耳掃除をする際の、耳垢をこそぎ取る程度の強さが良いです。

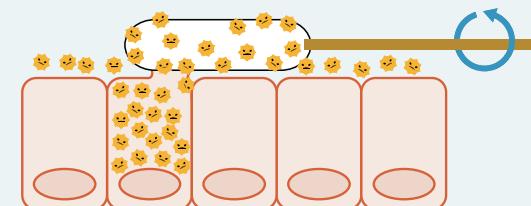

## 3. 保存液に入れる

細胞を採取した綿棒の綿棒先端部分を保存液に  
浸けて、キャップを反時計回りに回し  
**しっかりと蓋**してください。

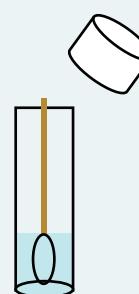

蓋がゆるいと搬送時に液漏れが起り、**正確な判定が出来なくなる**場合があります。

きちんと蓋がされている場合、閉めた後に時計回りに回しますと、**カチッという感覚とともに蓋がスムーズに開きます**。


その状態を確認したら、もう一度時計回しにしっかりと蓋を閉めてください。

しっかりと閉まっている場合は、スムーズに開かず、**蓋が斜めになってしまっている可能性**がありますので、一度蓋を外し、閉め直してください。

## 4. 返送準備

しっかりと蓋が閉まっている事を確認しましたら、保存液が入っていた小さな保存袋に入れ直し、きちんとチャックをします。

その後、同梱されていた「キット梱包用」袋に、先ほど保存袋に入れたものを入れ、二重梱包してください。

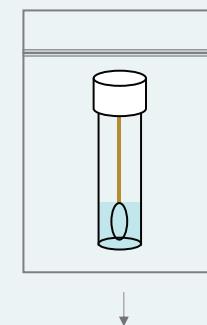

外装袋

### ※ 予備の綿棒について

予備で入っている綿棒は、「採取に失敗したかも...」と思われた場合にお使いいただく様に入れているため  
両方を使って2本をお送りいただく必要はございません。

検査をするのは1本のみとなりますので、2本お送りいただいた場合も結果は変わりません。