

返送について

採取した器具を検査依頼書・結果報告方法・アンケート(任意)とともに返信用封筒にてアイラボまでご返送ください。

返信用封筒をご利用いただくと、返送料が無料になります。

ご記入箇所

結果報告の受け取り方

オンラインでのご確認
ユーザー登録していただけます。検査完了から24時間以内に結果をお届けします。
結果報告は承認されますので、いつもお読みください。

郵便でのご確認
検査完了報告書はメールでさせていただきます。検査結果を確認して下さい。
検査結果が届きましたら、速やかに検査結果を確認して下さい。

返送部分

検査結果は、郵送の場合はお時間がかかりますのでインターネットでのご確認をお勧めします。

ご登録いただくといつでも結果が確認出来ますので、ぜひご登録ください。

ILABO
アイ・ラボ CytoSTD 研究所


ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい。
☎ 0426-52-0750
(月～金・日 10:30～18:00 土・祝休)



Be with you...

あなたと一緒に

男性尿・尿道検査キットの使い方

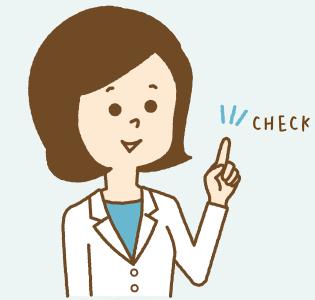


※お使いになる前にご確認ください

- ・採取直前の排尿は控えてください。2時間以上排尿をしていない状態、もしくは朝起きてすぐの採取をお願いします。
- ・特に症状はない場合は、心配な行為があつてから7～10日経つてから検査してください。
- ・手をよく洗って、清潔な状態で採取して下さい。
- ・綿棒での尿道分泌物やぬぐい液の採取は、必ず尿の採取の前に行ってください。

各部分の名称

こちらの名称を使って説明しますので、まずご確認下さい。

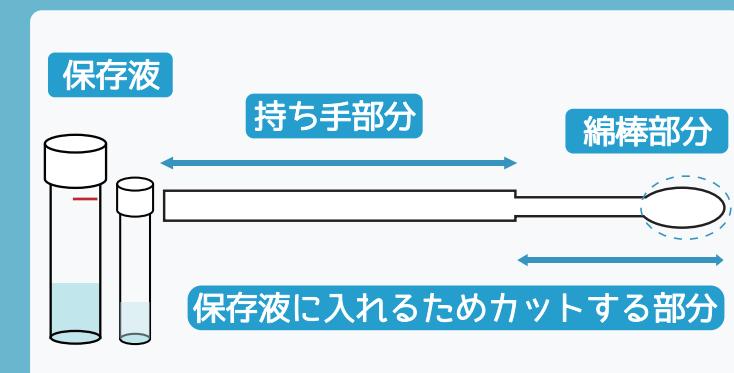

保存液の容器には「採取日」「お名前」「年齢」をご記入いただくシールが貼ってあります。

こちらにまずご記入をお願いいたします。

男性尿・尿道 自己採取手順

1. 採取前の準備

紙の保護袋から綿棒を取り出します。

滅菌済みの綿棒ですので、**綿棒先端部分には触れない様、棒部分を持って**取り出してください。

この検査は尿だけでも可能ですが、分泌物を採取するとより多くの病原体の採取が出来、より正確に検査が行えますので、分泌物の採取もお願いします。

分泌液採取に使用する医療用綿棒は、家庭用綿棒よりもはるかに柔らかくて細いものなので、安心してお使いいただけます。


2. 尿道からの分泌液・ぬぐい液の採取

尿道から分泌物がある場合は、綿棒で分泌物を採取してください。分泌物がない場合、**尿道内に綿棒部分のみを入れ、尿道内の粘液(ぬぐい液)**を採取してください。

綿棒が長く扱いづらい場合、先に綿棒を保存液の長さにカットしてから採取されても問題ありません。

ぬぐい液を採取する場合、表面にある細胞を擦り取るイメージで数回クレクルと綿棒を回して、ゆっくりと引き出してください。
深呼吸をしながらゆっくり挿入するとスムーズに入りやすいです。

※ 分泌物やぬぐい液の採取は、必ず「**採尿の前**」に行ってください。

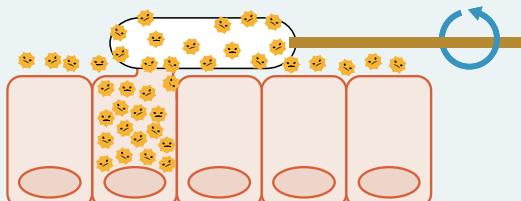

3. 綿棒を保存液に入れる

採取前に綿棒をカットしていない場合は、「**尿道用**」と書かれた小さい方の保存液容器に綿棒の先を入れ、蓋が閉められる長さで綿棒をカットします。

綿棒を容器に入れ終わったら、**しっかりと蓋をして**ください。

蓋がゆるいと搬送時に液漏れが起こり、**正確な判定が出来なくなる**場合があります。

きちんと蓋がされている場合、閉めた後に時計回りに回しますと、**カチッという感覚とともに蓋がスムーズに開きます**。

その状態を確認したら、もう一度時計回しにしっかりと蓋を閉めてください。

しっかりと閉まっている場合は、スムーズに開かず、**蓋が斜めになってしまっている可能性**がありますので、一度蓋を外し、閉め直してください。


4. 尿の採取

綿棒採取が終わったら、次は尿を採取しましょう。

採取は、キットに同梱されている**紙コップ**を使って行います。

必ず、おしっこをする際に一番最初に出る初尿をペットボトルのキャップ1~2杯分(15cc程度)紙コップで採取してください。


座って採取する方がこぼれがないため、座って採取をお勧めします。

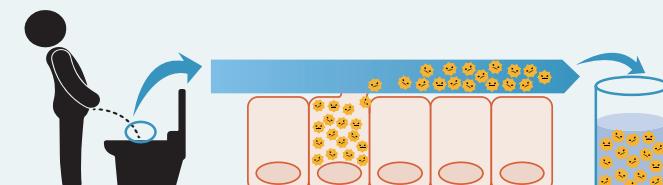

初尿で尿道内の菌を流すため、初尿以降のものには細菌がほぼ含まれていません。そのため、**正確な検査のため**には**初尿が必要**となります。

5. 尿を保存液に入れる

紙コップにとった初尿を、「**尿用**」と書かれた大きい方の保存容器に入れてください。保存容器に赤いラインが書かれていますので、そのラインまで入れます。


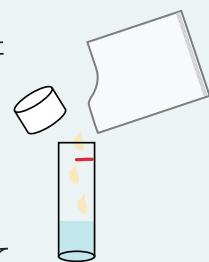


こちらも液漏れを防ぐために「3」に書かれている要領で**しっかりと蓋をして**ください。

6. 返送準備

保存液容器が2本とも漏れがない事を確認し、容器が入っていた透明の保存袋で密封します。

その後、同梱されていた「キット梱包用」袋に、先ほど保存袋に入れたものを入れて、二重梱包してください。

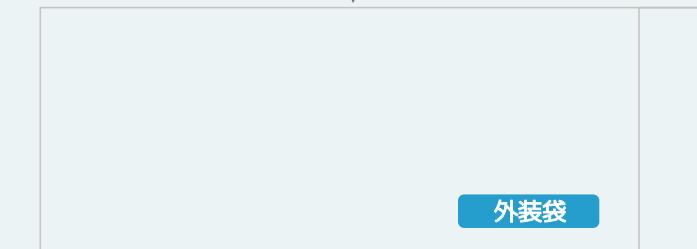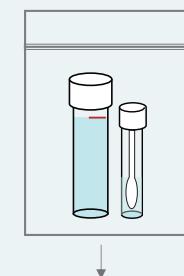

外袋