

検査結果の受け取り方

検査結果はオンラインでお伝えします。

検査結果を確認するには「I-LABO診断」へのユーザー登録が必要となります。

1. 右下のQRコード、もしくはアイラボサイト右上「検査結果」をクリックしていただくと表示される、サイトの左側にあります「ユーザー登録」よりご登録をお願いします。

2. ご登録いただくと、「仮登録完了」メールが届きます。

検査が完了するまでは、サイトにログイン出来ませんのでご注意ください。

検査完了のお知らせが届いたらログイン可能となり、検査結果をご確認いただける様になります。



※ 個人情報保護のため検査結果確認サイトはショッピングサイトとは異なりますので、**ショッピングサイト会員とは別でユーザー登録**をお願いいたします。

※ すでに検査結果確認サイト「I-LABO診断」へのユーザー登録をされている方は、**新たに登録の必要はありません**。

すでに「I-LABO診断」へのユーザー登録がお済みの方は、新たな検査結果が出る前でもログイン可能で、ログインすると以前の検査結果をご確認いただけます。

新たな検査結果については、アイラボからお送りする**「検査完了報告メール」**が届き次第ご確認いただけます。



I-LABOサイト:<https://ilabo-cyto-std.com>

I-LABO診断:<https://ilabo-cyto-std-shindan.com>

シンプルキットの使い方



※お使いになる前にご確認ください


- ・妊娠中のご利用はできません。
- ・正確な検査のため、生理中・出血中の採取は避けて下さい。
- ・入浴直後の採取は控えて下さい。シャワーのみ、もしくは入浴後2時間以上経っていれば大丈夫です。
- ・採取前の膣洗浄は控えて下さい。
- ・採取直前のセックスは控えて下さい。
- ・手をよく洗って、清潔な状態で採取して下さい。
- ・採取を他の人にやってもらうのは危険ですので、ご自身で採取してください。
- ・子宮内に避妊具を装着している方は、医師にご相談下さい。



ILABO
アイ・ラボ CytoSTD 研究所
0426-52-0750
(月～金・日 10:30～18:00 土・祝休)

各部分の名称

こちらの名称を使って説明しますので、まずご確認下さい。

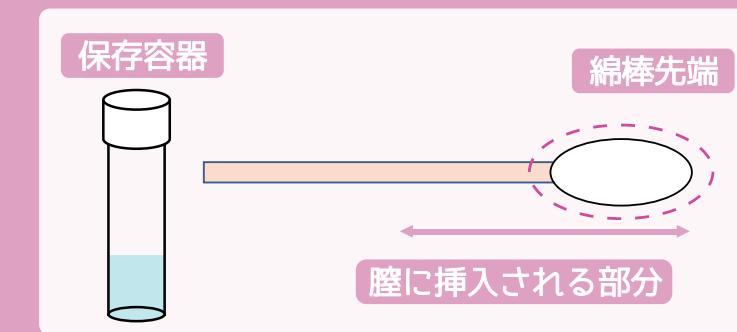

シンプルキット 自己採取手順

1. 採取前の準備


保存容器には、情報を記入するシールが貼ってあります。

- ・採取日
 - ・年齢
 - ・お名前

をまずご記入ください。



挿入しましたら、膣の壁を優しく
ゆっくりこする様に4～5回綿棒を
回し、膣の壁の粘液を採取してください。

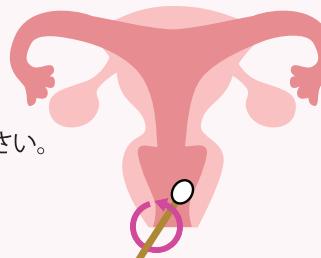


記入されましたら容器のキャップを開け、倒れない様にしておきましょう。

2. 採取する

滅菌済の袋にはいった綿棒を取り出します。

綿棒先端には手を触れない様、棒の部分を持ち**脇内に挿入**します。

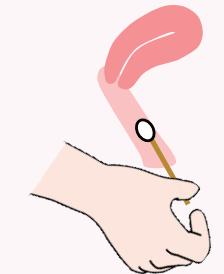

綿棒先端だけを挿入するのではなく、棒部分も挿入します。
挿入する長さは全体の半分くらいです。

緊張して力が入ってしまうと膣が縮まってしまい入りにくくなるので、深呼吸をしながら吐く息に合わせて、ゆっくり挿入するのも良い方法です。

入りにくい為にゼリー等を使用すると、検査結果に誤差が生じますので、利用は避けてください。

3. 保存容器へ


採取し終わったら、素早く綿棒を保存容器に入れ、綿棒先端を保存液に浸し、蓋を閉めてください。

蓋がゆるいと搬送時に液漏れが起り、**正確な判定が出来なくなる**場合があります。

きちんと蓋がされている場合、閉めた後に時計回りに回しますと、カチッという感覚とともに蓋がスムーズに開きます。

その状態を確認しましたら、もう一度時計回しにしっかりと蓋を閉めてください。

しっかりと閉まっていない場合は、スームーズに開かず、**蓋が斜めになってしまっている可能性**がありますので、一度蓋を外し、閉め直してください。

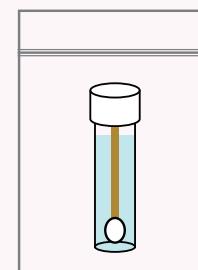

しっかりと蓋が閉まっている事を確認したら、保存容器が入っていた小さな保存袋に入れ直し、きちんとチャックをしてください。

4. 返送する

キットに同封されている「依頼書」に必要事項をご記入ください。

ご記入いただきましたら、先ほど保存袋に入れた検体とともに
返信用封筒に入れ、投函してください。

返信用封筒をご利用いただきますと、送料がかかりません。

* シンプルキットでの検査について

シンプルキットでの検査は、淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、細菌性膿症、マイコプラズマ、ウレアプラズマを調べるもので、子宮頸がんやHPV感染の検査を目的としたものではありません。

子宮頸がんやHPV感染を検査したい場合は別の専用キットをご紹介しますので、ご相談ください。