

返送について

採取した器具を検査依頼書・結果報告方法・アンケート(任意)。


ともに返信用封筒にてアイラボまでご返送ください。



Be with you..

あなたと一緒に

咽頭（のど）検査キットの使い方

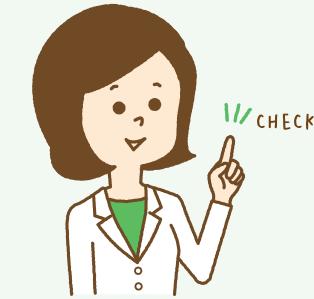


※お使いになる前にご確認ください

- 採取直前にうがいや歯磨き、飲食は避けてください。
うがい・歯磨き・飲食後、少なくとも2時間が開けてください。
 - 手をよく洗って、清潔な状態で採取して下さい。

各部分の名称

こちらの名称を使って説明しますので、まずご確認下さい。

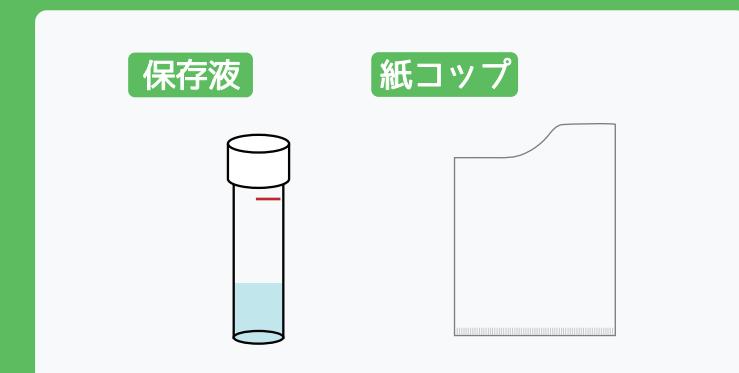

保存液の容器には「採取日」「お名前」「年齢」をご記入いただきシールが貼ってあります

こちらにまずご記入をお願いいたします

ILABO ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい
アイ・ラボ CytoSTD 研究所 **0426-52-0750**
(月～金・日 10:30～18:00 土・祝休)

咽頭（のど）自己採取手順

1. 採取前の準備

紙コップの1/4くらいまで飲料水を入れます。

1/4くらいまでの量ですと、およそペットボトルのキャップ2杯分（約15cc）程度となります。

使用する水は水道水・ミネラルウォーター・ペットボトルの水・ウォーターサーバーの水、等どんな飲料水でも構いません。

ただし市販のペットボトルの水の場合、フレバー付きのものは避けてください。



保存液容器に入っている青い液体はうがい液ではなく、**検体を保存するための保存液**です。

こちらを使用しないようご注意ください。

2. うがいをする

紙コップに入れた水で、10秒ほどガラガラとうがいをします。

この際、飲み込んでしまわない程度になるべく**喉の奥まで水を含んで喉を洗う様なイメージ**でうがいをしてください。



マウスウォッシュをする時の様に口の中でクチュクチュとするだけですと検体がきちんと採取できません。

うがいが終わったら、うがいした水を紙コップに戻します。


3. 保存液に入れる

うがいした水を、こぼさない様に保存液容器に入れましょう。

容器には赤いラインがついていますので、その**赤いラインまで入れてください**。

万が一容量が足りなかった場合、足りないからと言って**水を足すのは厳禁**です。

容器に入れ終わったら、**しっかりと蓋を**してください。

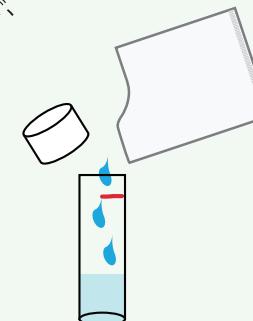

蓋がゆるいと搬送時に液漏れが起り、**正確な判定が出来なくなる**場合があります。

きちんと蓋がされている場合、閉めた後に時計回りに回しますと、**カチッ**という感覚とともに蓋がスムーズに開きます。

その状態を確認したら、もう一度時計回しにしっかりと蓋を閉めてください。


しっかりと閉まっていない場合は、スームーズに開かず、**蓋が斜めになってしまっている可能性**がありますので、一度蓋を外し、閉め直してください。

しっかりと蓋が閉まっている事を確認したら、保存液が入っていた小さな保存袋に入れ直し、きちんとチャックをしてください。

4. 返送準備

同梱されていた「キット梱包用」袋に、先ほど保存袋に入れたものを入れて、二重梱包してください。

こちらで発送準備完了となります。

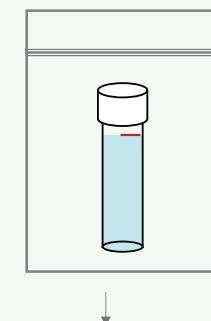

外装袋

※ 赤いラインまでの量がなかった場合

うがいした水を保存容器に入れた際に赤いラインまでの量がなかった場合、量が足りないからと言って水を足さないでください。

水を足してしまうと、せっかく採取した検体が薄まり正確な検査が出来ません。

多少の不足は問題ありませんので、少々足りなくてもそのままお送りください。